

## TJF-Q290V 取り扱い上の注意点(洗浄室編)

### 十二指腸鏡 TJF-Q290V の特徴




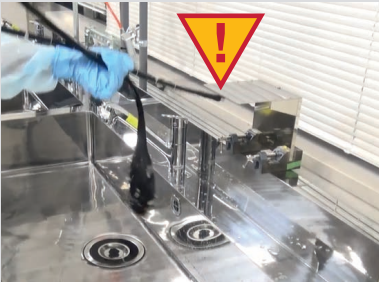









EVIS LUCERA ELITE 十二指腸ビデオスコープ OLYMPUS TJF-Q290V は、効率的なリプロセッシングのために、取外し可能な先端カバーを採用しています。また、内視鏡先端内部には、繊細な機構が搭載されています。



### 取扱説明書 操作編 に記載されている警告

内視鏡の先端部、軟性部、湾曲部、操作部、ユニバーサルコード、スコープコネクター部をぶついたり、落下させたりしないこと。また、強い力で曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしないこと。機器が破損し、体腔内を傷付けたり、熱傷、出血、穿孔、部品の脱落のおそれがあります。

\*このシートに記載の内容は参考用のものです。詳細については、装置に付属の説明書を参照してください。

Not Good		Good
  <p>先端部が把持されていない</p>	  <p>先端部が棚などに衝突するかもしれません</p>	  <p>先端部が振れないようにしっかり把持して下さい</p>
 <p>先端部が把持されていない</p>	  <p>先端部がシンクに衝突するかもしれません</p>	 <p>シンクに置くまで、先端部をしっかり把持して下さい</p>
 <p>先端部が把持されていない</p>	  <p>先端部がシンクに衝突するかもしれません</p>	

# TJF-Q290V 取り扱い上の注意点 (検査室編)

## 十二指腸鏡 TJF-Q290V の特徴

EVIS LUCERA ELITE 十二指腸ビデオスコープ OLYMPUS TJF-Q290V は、効率的なリプロセッシングのために、取外し可能な先端カバーを採用しています。また、内視鏡先端内部には、繊細な機構が搭載されています。




## 取扱説明書 操作編 に記載されている警告

内視鏡の先端部、軟性部、湾曲部、操作部、ユニバーサルコード、スコープコネクター部をぶつけたり、落下させたりしないこと。また、強い力で曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしないこと。機器が破損し、体腔内を傷付けたり、熱傷、出血、穿孔、部品の脱落のおそれがあります。

\*このシートに記載の内容は参考用のものです。詳細については、装置に付属の説明書を参照してください。




### Not Good

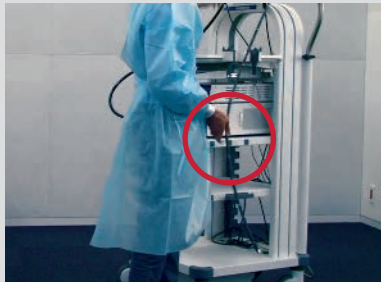


揺れている挿入部から手を離す



先端部がトロリーに衝突するかもしれません

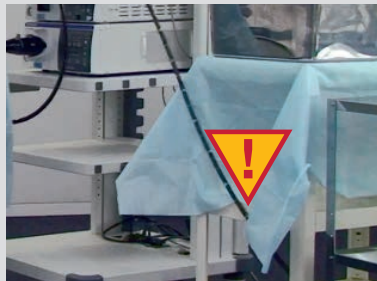

先端部がワゴンに衝突するかもしれません

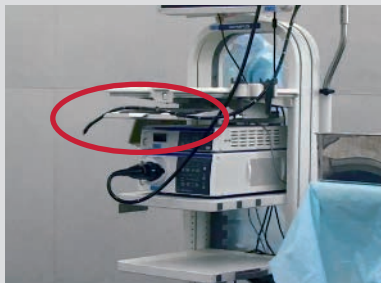

挿入部を不安定に設置



予期しない接触で挿入部が落下するかもしれません



### Good



揺れが落ち着くまで挿入部を把持して下さい



挿入部は鉛直方向に架けて下さい

●仕様・外観については、予告なしに変更する場合があります。あらかじめご了承ください。