

④ 軟性内視鏡 特殊管路の洗浄消毒の重要性について

✓ お使いの内視鏡にはどんな特殊管路がありますか？

当社製軟性内視鏡の中には、**特殊管路(内視鏡の特殊な機能を満たすために必要な管路)**を有するものがあります。**特殊管路はそれぞれ専用の洗浄具を用いて、使用有無にかかわらず洗浄消毒をしていただく必要があります。**内視鏡がどのような管路を有しているのか、把握いただいたうえでのご使用をお願いします。

▶ 副送水チャンネル

例1:GIF-HQ290 (290シリーズ)




例2:PCF-Q260J (260シリーズ)



▶ 鉗子チャンネルA、鉗子チャンネルB

例3:GIF-2TQ260M (鉗子チャンネルを2つ有する内視鏡)

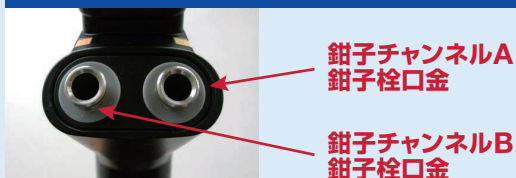

▶ 鉗子起上ワイヤーチャンネル

例4:TJF-260V (十二指腸鏡)



▶ バルーン吸引チャンネル

例5:GF-UE260-AL5 (消化管用超音波内視鏡)



▶ バルーン用送水・吸引管路

例6:BF-UC260FW (気管支用超音波内視鏡)



➤ 資料裏面には、特にご注意ください点検のポイントをまとめております。

