

重要なお知らせ

No. 156PB-0620

2024 年 2 月

お客様各位

オリンパスメディカルシステムズ株式会社
安全管理責任者 村上 和士修理・点検品の軟性内視鏡についての注意

拝啓 時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
この度、弊社修理施設で修理・点検された全てのチャンネル付き軟性内視鏡(型番は添付資料参照)において、修理・点検後にお客さまに返送された一部の製品のチャンネル内に残水が生じる事例が発生しました。
つきましては、下記についてご確認頂き、ご対応をお願いしたくご案内申し上げます。

敬具

記

1. 対象製品

2023 年 8 月 16 日以前にオリンパスの修理施設で修理・点検されたすべてのチャンネル付き軟性内視鏡。
詳細は別紙をご確認ください。

2. 現象

修理や点検後にお客さまに返送された一部の機器のチャンネルに残水が生じる事例が発生しました。
内視鏡のチャンネル内に水が残っていると、感染のリスクとなる可能性があります。なお、本件に関連した有害事象の報告は受けておりません。

3. 原因

弊社修理施設では、修理や点検を行ったチャンネル付き軟性内視鏡はチャンネルの最終検査においてチャンネルの洗浄を行い、その後、送気することによりチャンネルを乾燥させます。今回、そのチャンネルへの送気の条件が適切に設定されていなかったことを確認しました。
日本の修理施設における送気の見直し済みであり、2023 年 8 月 17 日以降に修理や点検を行ったチャンネル付き軟性内視鏡のチャンネル内に残水が発生することはありません。

4. ご使用上のお願い

修理・点検後にお客さまに返送されたチャンネル付き軟性内視鏡について、以下のご対応をお願い申し上げます。

- ✓ 修理・点検後に返送されたチャンネル付き軟性内視鏡および付属品を、保管する前、および症例に使用する前に洗浄消毒を実施してください。
- ✓ 修理完了日が 2023 年 8 月 16 日以前のチャンネル付き軟性内視鏡のうち、ご施設で洗浄消毒を実施していないものについて残水が確認された場合は、本文書「5. 本件に関するお問い合わせ先」までご連絡ください。

5. 本件に関するお問い合わせ先

ご不明な点・ご質問等につきましては、最寄りの支店または内視鏡お客様相談センター(0120-41-7149)までお問合せください。

以上

修理・点検品の軟性内視鏡についての注意 別紙

対象：2023年8月16日以前にオリンパスの修理拠点で修理・点検された以下のチャンネル付き軟性内視鏡

No.	販売名	型番
1	EVIS LUCERA 気管支ビデオスコープ OLYMPUS BF TYPE 1T260	BF-1T260
2	OES 気管支ファイバースコープ OLYMPUS BF TYPE 1T60	BF-1T60
3	気管支ビデオスコープ OLYMPUS BF-1TH1200	BF-1TH1200
4	EVIS EXERA III 気管支ビデオスコープ OLYMPUS BF-1TH190	BF-1TH190
5	EVIS LUCERA ELITE 気管支ビデオスコープ OLYMPUS BF-1TQ290	BF-1TQ290
6	EVIS LUCERA 気管支ビデオスコープ OLYMPUS BF TYPE 260	BF-260
7	OES 気管支ファイバースコープ OLYMPUS BF TYPE 3C40	BF-3C40
8	EVIS LUCERA 気管支ビデオスコープ OLYMPUS BF TYPE 6C260	BF-6C260
9	EVIS LUCERA 気管支ビデオスコープ OLYMPUS BF TYPE F260	BF-F260
10	気管支ビデオスコープ OLYMPUS BF-H1200	BF-H1200
11	EVIS EXERA III 気管支ビデオスコープ OLYMPUS BF-H190	BF-H190
12	EVIS LUCERA ELITE 気管支ビデオスコープ OLYMPUS BF-H290	BF-H290
13	EVIS LUCERA ELITE 気管支ファイバービデオスコープ OLYMPUS BF-MP290F	BF-MP290F
14	EVIS LUCERA 気管支ファイバービデオスコープ OLYMPUS BF TYPE P260F	BF-P260F
15	EVIS LUCERA ELITE 気管支ビデオスコープ OLYMPUS BF-P290	BF-P290
16	OES 気管支ファイバースコープ OLYMPUS BF TYPE P60	BF-P60
17	EVIS EXERA III 気管支ビデオスコープ OLYMPUS BF-Q190	BF-Q190
18	EVIS LUCERA ELITE 気管支ビデオスコープ OLYMPUS BF-Q290	BF-Q290
19	EVIS EXERA II 超音波気管支ファイバービデオスコープ OLYMPUS BF TYPE UC180F	BF-UC180F
20	EVIS LUCERA 超音波気管支ファイバービデオスコープ OLYMPUS BF TYPE UC260FW	BF-UC260FW
21	EVIS EUS 超音波気管支ファイバービデオスコープ OLYMPUS BF-UC290F	BF-UC290F
22	EVIS LUCERA 気管支ファイバービデオスコープ OLYMPUS BF TYPE XP260F	BF-XP260F
23	EVIS LUCERA ELITE 気管支ビデオスコープ OLYMPUS BF-XP290	BF-XP290
24	OES 気管支ファイバースコープ OLYMPUS BF TYPE XP60	BF-XP60
25	大腸ビデオスコープ OLYMPUS CF-EZ1500D シリーズ	CF-EZ1500DI
26	大腸ビデオスコープ OLYMPUS CF-EZ1500D シリーズ	CF-EZ1500DL
27	EVIS LUCERA 大腸ビデオスコープ OLYMPUS CF TYPE FH260AZ シリーズ	CF-FH260AZI
28	EVIS LUCERA 大腸ビデオスコープ OLYMPUS CF TYPE FH260AZ シリーズ	CF-FH260AZL
29	EVIS EXERAIII 大腸ビデオスコープ OLYMPUS CF-H190 シリーズ	CF-H190L
30	EVIS LUCERA 大腸ビデオスコープ OLYMPUS CF TYPE H260A シリーズ	CF-H260AI
31	EVIS LUCERA 大腸ビデオスコープ OLYMPUS CF TYPE H260A シリーズ	CF-H260AL
32	EVIS LUCERA 大腸ビデオスコープ OLYMPUS CF TYPE H260AZ シリーズ	CF-H260AZI
33	EVIS LUCERA 大腸ビデオスコープ OLYMPUS CF TYPE H260AZ シリーズ	CF-H260AZL
34	EVIS LUCERA 大腸ビデオスコープ OLYMPUS CF TYPE H260D シリーズ	CF-H260DI
35	EVIS LUCERA 大腸ビデオスコープ OLYMPUS CF TYPE H260D シリーズ	CF-H260DL
36	EVIS LUCERA ELITE 大腸ビデオスコープ OLYMPUS CF-H290ECI	CF-H290ECI
37	EVIS LUCERA ELITE 大腸ビデオスコープ OLYMPUS CF-H290 シリーズ	CF-H290I
38	EVIS LUCERA ELITE 大腸ビデオスコープ OLYMPUS CF-H290 シリーズ	CF-H290L
39	EVIS EXERAIII 大腸ビデオスコープ OLYMPUS CF-HQ190 シリーズ	CF-HQ190I

40	EVIS LUCERA ELITE 大腸ビデオスコープ OLYMPUS CF-HQ290 シリーズ	CF-HQ290I
41	EVIS LUCERA ELITE 大腸ビデオスコープ OLYMPUS CF-HQ290 シリーズ	CF-HQ290L
42	EVIS LUCERA ELITE 大腸ビデオスコープ OLYMPUS CF-HQ290Z シリーズ	CF-HQ290ZI
43	EVIS LUCERA ELITE 大腸ビデオスコープ OLYMPUS CF-HQ290Z シリーズ	CF-HQ290ZL
44	EVIS LUCERA 大腸ビデオスコープ OLYMPUS CF TYPE Q260A シリーズ	CF-Q260AI
45	EVIS LUCERA 大腸ビデオスコープ OLYMPUS CF TYPE Q260A シリーズ	CF-Q260AL
46	EVIS LUCERA 大腸ビデオスコープ OLYMPUS CF TYPE Q260D シリーズ	CF-Q260DI
47	EVIS LUCERA 大腸ビデオスコープ OLYMPUS CF TYPE Q260D シリーズ	CF-Q260DL
48	大腸ビデオスコープ OLYMPUS CF-XZ1200 シリーズ	CF-XZ1200I
49	大腸ビデオスコープ OLYMPUS CF-XZ1200 シリーズ	CF-XZ1200L
50	EVIS LUCERA 多用途細径ビデオスコープ OLYMPUS CHF TYPE B260	CHF-B260
51	EVIS LUCERA ELITE 胆道ビデオスコープ OLYMPUS CHF-B290	CHF-B290
52	EVIS LUCERA 多用途細径ビデオスコープ OLYMPUS CHF TYPE BP260	CHF-BP260
53	OES 胆道ファイバースコープ OLYMPUS CHF TYPE CB30 シリーズ	CHF-CB30L
54	OES 胆道ファイバースコープ OLYMPUS CHF TYPE P60	CHF-P60
55	胆道ビデオスコープ OLYMPUS CHF TYPE V	CHF-V
56	胆道ビデオスコープ OLYMPUS CHF-V2	CHF-V2
57	OES 膀胱腎盂ファイバースコープ OLYMPUS CYF-5A	CYF-5A
58	VISERA 膀胱腎盂ビデオスコープ OLYMPUS CYF TYPE VA2	CYF-VA2
59	膀胱腎盂ビデオスコープ OLYMPUS CYF-VHA	CYF-VHA
60	鼻咽喉ファイバースコープ OLYMPUS ENF TYPE T3	ENF-T3
61	鼻咽喉ビデオスコープ OLYMPUS ENF TYPE VT2	ENF-VT2
62	鼻咽喉ビデオスコープ OLYMPUS ENF-VT3	ENF-VT3
63	超音波ガストロビデオスコープ OLYMPUS GF TYPE UC140P-AL5	GF-UC140P-AL5
64	超音波ガストロビデオスコープ OLYMPUS GF TYPE UC160P-OL5	GF-UC160P-OL5
65	超音波ガストロビデオスコープ OLYMPUS GF TYPE UCT140-AL5	GF-UCT140-AL5
66	超音波ガストロビデオスコープ OLYMPUS GF TYPE UCT160-OL5	GF-UCT160-OL5
67	EVIS EXERA II 超音波ガストロビデオスコープ OLYMPUS GF TYPE UCT180	GF-UCT180
68	EVIS LUCERA 超音波ガストロビデオスコープ OLYMPUS GF TYPE UCT260	GF-UCT260
69	超音波ガストロビデオスコープ OLYMPUS GF TYPE UE160-AL5	GF-UE160-AL5
70	超音波ガストロビデオスコープ OLYMPUS GF TYPE UE260-AL5	GF-UE260-AL5
71	EVIS EUS 超音波消化管ビデオスコープ OLYMPUS GF-UE290	GF-UE290
72	EUS EXERA システム	GF-UM160
73	上部消化管汎用ビデオスコープ OLYMPUS GIF-1200N	GIF-1200N
74	EVIS 上部消化管汎用ビデオスコープ OLYMPUS GIF TYPE 2T240	GIF-2T240
75	EVIS LUCERA 上部消化管汎用ビデオスコープ OLYMPUS GIF TYPE 2TQ260M	GIF-2TQ260M
76	上部消化管汎用ビデオスコープ OLYMPUS GIF-EZ1500	GIF-EZ1500
77	EVIS LUCERA 上部消化管汎用ビデオスコープ OLYMPUS GIF TYPE FQ260Z	GIF-FQ260Z
78	上部消化管汎用ビデオスコープ OLYMPUS GIF-H170	GIF-H170
79	EVIS EXERA III 上部消化管汎用ビデオスコープ OLYMPUS GIF-H190	GIF-H190
80	EVIS EXERA III 上部消化管汎用ビデオスコープ OLYMPUS GIF-H190N	GIF-H190N
81	EVIS LUCERA 上部消化管汎用ビデオスコープ OLYMPUS GIF TYPE H260	GIF-H260

82	EVIS LUCERA 上部消化管汎用ビデオスコープ OLYMPUS GIF TYPE H260Z	GIF-H260Z
83	EVIS LUCERA ELITE 上部消化管汎用ビデオスコープ OLYMPUS GIF-H290	GIF-H290
84	EVIS LUCERA ELITE 上部消化管汎用ビデオスコープ OLYMPUS GIF-H290EC	GIF-H290EC
85	EVIS LUCERA ELITE 上部消化管汎用ビデオスコープ OLYMPUS GIF-H290T	GIF-H290T
86	EVIS LUCERA ELITE 上部消化管汎用ビデオスコープ OLYMPUS GIF-H290Z	GIF-H290Z
87	EVIS EXERA III 上部消化管汎用ビデオスコープ OLYMPUS GIF-HQ190	GIF-HQ190
88	EVIS LUCERA ELITE 上部消化管汎用ビデオスコープ OLYMPUS GIF-HQ290	GIF-HQ290
89	EVIS LUCERA 上部消化管汎用ビデオスコープ OLYMPUS GIF TYPE KH260	GIF-KH260
90	OES 上部消化管汎用ファイバースコープ OLYMPUS GIF TYPE P30	GIF-P30
91	EVIS LUCERA 上部消化管汎用ビデオスコープ OLYMPUS GIF TYPE PQ260	GIF-PQ260
92	上部消化管汎用ビデオスコープ OLYMPUS GIF TYPE Q150X	GIF-Q150X
93	EVIS 上部消化管汎用ビデオスコープ OLYMPUS GIF TYPE Q240Z	GIF-Q240Z
94	EVIS LUCERA 上部消化管汎用ビデオスコープ OLYMPUS GIF TYPE Q260	GIF-Q260
95	EVIS LUCERA 上部消化管汎用ビデオスコープ OLYMPUS GIF TYPE Q260J	GIF-Q260J
96	EVIS LUCERA 上部消化管汎用ビデオスコープ OLYMPUS GIF TYPE RQ260Z	GIF-RQ260Z
97	上部消化管汎用ビデオスコープ OLYMPUS GIF TYPE XP150N	GIF-XP150N
98	上部消化管汎用ビデオスコープ OLYMPUS GIF-XP170N	GIF-XP170N
99	EVIS EXERAIII 上部消化管汎用ビデオスコープ OLYMPUS GIF-XP190N	GIF-XP190N
100	EVIS LUCERA 上部消化管汎用ビデオスコープ OLYMPUS GIF TYPE XP260NS	GIF-XP260NS
101	EVIS LUCERA ELITE 上部消化管汎用ビデオスコープ OLYMPUS GIF-XP290N	GIF-XP290N
102	EVIS LUCERA 上部消化管汎用ビデオスコープ OLYMPUS GIF TYPE XQ260	GIF-XQ260
103	上部消化管汎用ビデオスコープ OLYMPUS GIF-XZ1200	GIF-XZ1200
104	OES ヒステロファイバースコープ OLYMPUS HYF TYPE 1T	HYF-1T
105	VISERA ヒステロビデオスコープ OLYMPUS HYF TYPE V	HYF-V
106	OES ヒステロファイバースコープ OLYMPUS HYF TYPE XP	HYF-XP
107	EVIS LUCERA 十二指腸ビデオスコープ OLYMPUS JF TYPE 260V	JF-260V
108	喉頭ファイバースコープ OLYMPUS LF-DP	LF-DP
109	喉頭ファイバースコープ OLYMPUS LF-GP	LF-GP
110	喉頭ファイバースコープ OLYMPUS LF-TP	LF-TP
111	エアウェイマネジメントモバイルスコープ OLYMPUS MAF-DM2	MAF-DM2
112	エアウェイマネジメントモバイルスコープ OLYMPUS MAF TYPE GM	MAF-GM
113	エアウェイマネジメントモバイルスコープ OLYMPUS MAF-GM2	MAF-GM2
114	エアウェイマネジメントモバイルスコープ OLYMPUS MAF TYPE TM	MAF-TM
115	エアウェイマネジメントモバイルスコープ OLYMPUS MAF-TM2	MAF-TM2
116	大腸ビデオスコープ OLYMPUS PCF-H170 シリーズ	PCF-H170I
117	大腸ビデオスコープ OLYMPUS PCF-H170 シリーズ	PCF-H170L
118	EVIS EXERA III 大腸ビデオスコープ OLYMPUS PCF-H190D シリーズ	PCF-H190DI
119	EVIS EXERA III 大腸ビデオスコープ OLYMPUS PCF-H190D シリーズ	PCF-H190DL
120	EVIS EXERAIII 大腸ビデオスコープ OLYMPUS PCF-H190 シリーズ	PCF-H190I
121	EVIS LUCERA ELITE 大腸ビデオスコープ OLYMPUS PCF-H290D シリーズ	PCF-H290DI
122	EVIS LUCERA ELITE 大腸ビデオスコープ OLYMPUS PCF-H290D シリーズ	PCF-H290DL
123	EVIS LUCERA ELITE 大腸ビデオスコープ OLYMPUS PCF-H290 シリーズ	PCF-H290I

124	EVIS LUCERA ELITE 大腸ビデオスコープ OLYMPUS PCF-H290 シリーズ	PCF-H290L
125	EVIS LUCERA ELITE 大腸ビデオスコープ OLYMPUS PCF-H290T シリーズ	PCF-H290TI
126	EVIS LUCERA ELITE 大腸ビデオスコープ OLYMPUS PCF-H290T シリーズ	PCF-H290TL
127	EVIS LUCERA ELITE 大腸ビデオスコープ OLYMPUS PCF-H290Z シリーズ	PCF-H290ZI
128	EVIS LUCERA ELITE 大腸ビデオスコープ OLYMPUS PCF-H290Z シリーズ	PCF-H290ZL
129	EVIS LUCERA 大腸ビデオスコープ OLYMPUS PCF TYPE PQ260 シリーズ	PCF-PQ260I
130	EVIS LUCERA 大腸ビデオスコープ OLYMPUS PCF TYPE PQ260 シリーズ	PCF-PQ260L
131	大腸ビデオスコープ OLYMPUS PCF TYPE Q150A シリーズ	PCF-Q150AI
132	大腸ビデオスコープ OLYMPUS PCF TYPE Q150A シリーズ	PCF-Q150AL
133	EVIS LUCERA 大腸ビデオスコープ OLYMPUS PCF TYPE Q260A シリーズ	PCF-Q260AI
134	EVIS LUCERA 大腸ビデオスコープ OLYMPUS PCF TYPE Q260A シリーズ	PCF-Q260AL
135	EVIS LUCERA 大腸ビデオスコープ OLYMPUS PCF TYPE Q260AZI	PCF-Q260AZI
136	EVIS LUCERA 大腸ビデオスコープ OLYMPUS PCF TYPE Q260J シリーズ	PCF-Q260JI
137	EVIS LUCERA 大腸ビデオスコープ OLYMPUS PCF TYPE Q260J シリーズ	PCF-Q260JL
138	消化管ビデオスコープ OLYMPUS PSF-1	PSF-1
139	EVIS EXERA III 小腸ビデオスコープ OLYMPUS SIF-H190	SIF-H190
140	EVIS LUCERA ELITE 小腸ビデオスコープ OLYMPUS SIF-H290S	SIF-H290S
141	EVIS LUCERA 小腸ビデオスコープ OLYMPUS SIF TYPE Q260	SIF-Q260
142	EVIS EXERA II 超音波ガストロビデオスコープ OLYMPUS TGF-UC180J	TGF-UC180J
143	EVIS LUCERA 超音波ガストロビデオスコープ OLYMPUS TGF-UC260J	TGF-UC260J
144	EVIS LUCERA 十二指腸ビデオスコープ OLYMPUS TJF TYPE 260V	TJF-260V
145	EVIS EXERA II 十二指腸ビデオスコープ OLYMPUS TJF TYPE Q180V	TJF-Q180V
146	EVIS LUCERA ELITE 十二指腸ビデオスコープ OLYMPUS TJF-Q290V	TJF-Q290V
147	OES 腎盂尿管ファイバースコープ OLYMPUS URF TYPE P5	URF-P5
148	腎盂尿管ファイバースコープ OLYMPUS URF-P6	URF-P6
149	腎盂尿管ファイバースコープ OLYMPUS URF-P7	URF-P7
150	腎盂尿管ビデオスコープ OLYMPUS URF TYPE V	URF-V
151	腎盂尿管ビデオスコープ OLYMPUS URF-V2	URF-V2
152	腎盂尿管ビデオスコープ OLYMPUS URF-V3	URF-V3
153	VISERA 脳室ビデオスコープ OLYMPUS VEF TYPE V	VEF-V